



## Brugsanvisning sejl

### Løftesejl:



Helsejehl



Halvsejehl



Toiletsejehl

### Løft fra liggende stilling:

Sejlet rulles sammen til midt på rygstykket. Patienten rulles om på siden, og sejlets rullede rygstykke lægges mod patientens ryg, så den nederste kant af rygstykket er ud for midten af patientens haleben.

Patienten rulles derefter om på den anden side, hen over sejlet, hvis ene halvdel derefter rulles ud. Patienten rulles tilbage på ryggen – på plads i sejlet. Benstøtterne føres under hvert lår og krydses.

Ophængspunkterne fastgøres på åg.

**Hvis seng/ leje har elevérbart hovedgærde, bør dette benyttes.**

Såfremt dette ikke forefindes, kan hjælperne støtte patienten til siddende stilling.



### Løft fra siddende stilling:

Sejlet holdes med benstøtterne nedaf. Rygstykket skubbes ned bag ryggen, til det når sædet, uden at det når ind under patienten. Benstøtterne føres frem langs benene i begge sider, og trækkes ind under hvert lår, så det ligger helt glat. De øverste ophængspunkter på rygstykket fastgøres på åg.

Benstøtterne føres under hvert lår og krydses.

Ophængspunkterne fastgøres på åg.

Når patienten løftes, lukker sejlet automatisk sammen i bunden. Der er dog stadig en tiltrækkelig stor åbning til f.eks. toiletbesøg

Mærkelast: 250 Kg (300 Kg).

Vasketemperatur: 65 ° anbefales / tåler 80 °

Materiale: Grå Bomuld + polyester

Nylon / Polyester

Net nylon til bad

Løftestropperne har farvekoder for at lette justeringen af patientens siddevinkel.

Faaborg Rehab Technic

Smedemestervej 9, DK-5600 Faaborg. Tlf. + 45 70 20 55 53

E-mail: [fr@faaborg-rehab.dk](mailto:fr@faaborg-rehab.dk) [www.faaborg-rehab.dk](http://www.faaborg-rehab.dk)